



Bitte folgen Sie ausschliesslich der Bedienungsanleitung

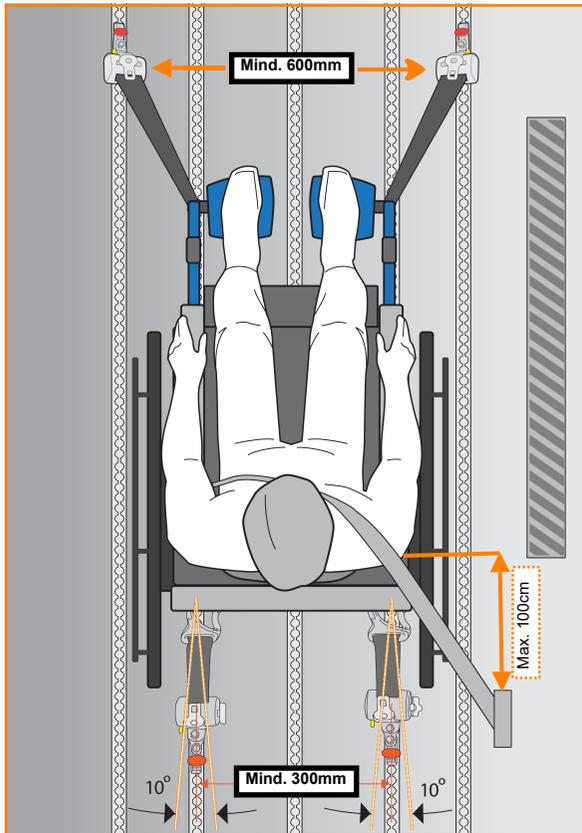


Platzierung des Rollstuhls in Fahrrichtung und möglichst nah zur Seitenwand. Mittig und symmetrisch zu den Bodenschienen. Maximal 100cm vorderhalb der Schultergurtverankerung.


Merke: DIN 75078:2 schreibt vor, dass für Rollstühle mit Kraftknoten im hinteren Bereich Schwerlastsysteme zu verwenden sind!

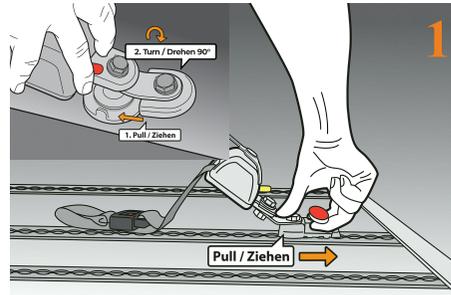


Rasten Sie die **vorderen** Fittinge der Retraktoren in die äußeren Bodenschienen.
Merke: Position der Spanngurte leicht diagonal zur Fahrrichtung und zum Rollstuhl und Abstand von einem Fitting zum anderen mindestens 600mm!

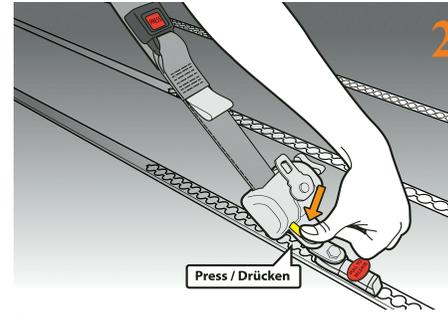


Lösen Sie den Arretierknopf und ziehen Sie die Spanngurte aus den Retraktoren.
Merke: Achten Sie zuvor darauf, dass der Rollstuhl möglichst nah zur Seitenwand sowie mittig und symmetrisch zu den Bodenschienen platziert ist. Nach Endpositionierung sichern Sie den Rollstuhl mit der Rollstuhlbremse!

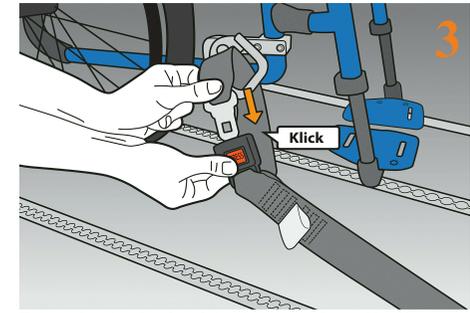


Führen Sie das Gurtband durch den **vorderen** Kraftknoten und verankern Sie die Steckzunge im Gurtschloss oder alternativ verankern Sie den Haken am Kraftknoten. Danach die Gurte leicht vorspannen.
Merke: Gurte niemals an beweglichen Teilen wie Speichen, Rädern, Fußstützen o.ä. befestigen!

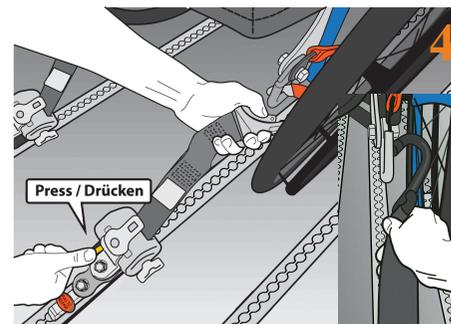


Rasten Sie die **hinteren** Fittinge der Spanngurte in die **hinteren** Bodenschienen und verankern Sie dann wieder das Gurtsystem (z.B. Haken-, Schwerlastkarabiner- oder Schlaufensystem) am **hinteren** Kraftknoten.

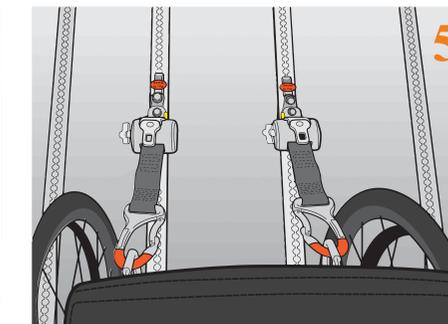


Die **hinteren** Retraktoren sind immer **gerade** zur Fahrrichtung und zum Rollstuhl zu positionieren.,
Merke: Der Verankerungspunkt der **hinteren** Spanngurte mit dem Befestigungspunkt am Rollstuhl sollte einen Winkel von ca. 45° zum Fahrzeugboden (s. Bild 1 links) ergeben!

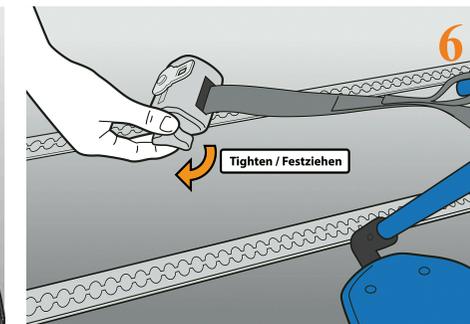


Spannen Sie die **hinteren** Gurte mit dem Handrad oder mit der Längenverstellung des Gurtbands nach, bis der untere Zusatzgurt leicht zum Boden hin durchhängt. (Schwerlastsysteme).

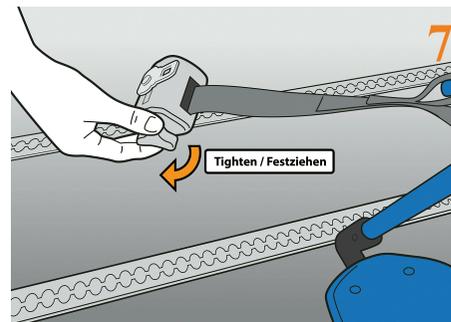

Lösen Sie die Rollstuhlbremsen und spannen Sie alle Retraktoren mit dem Handrad noch einmal nach. Abschliessend Rollstuhlbremsen wieder feststellen.
Merke: Achten Sie grundsätzlich darauf Gurte niemals zu verdrehen oder zu kreuzen!

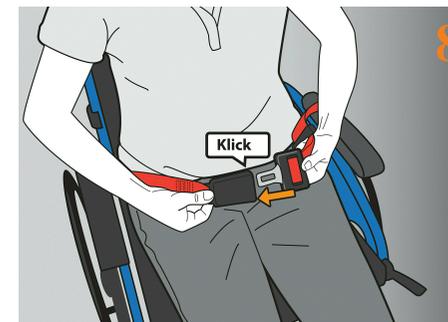


Sichern Sie jetzt den Rollstuhlfahrer mit dem Beckengurt. Der Verlauf des Gurtbands ist idealerweise **knapp über dem Beckenknochen**, (keinesfalls im Bauchbereich!).
Merke: Grundsätzlich kein Verlauf des Gurtbands über scharfe Ecken, Kanten, Spitzen o.ä.!

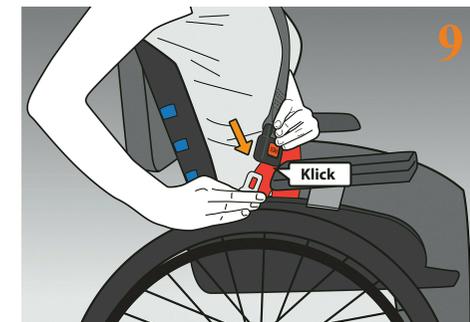

Abschliessend verankern Sie das Schloss des Schultergurts mit der Zunge des am Rollstuhl integrierten Beckengurts.
Merke: Der Schultergurt verläuft idealerweise mittig des Schlüsselbeins und nicht zu nah an der Schulter!

Bild 1

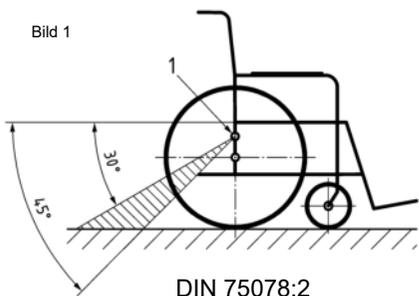

DIN 75078:2

Bild 2

